

**Laborinformation 08/2018 (aktualisiert 10/2019)**

**Testumstellung : Nachweis von Blut im Stuhl**

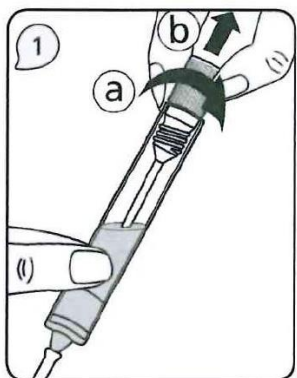

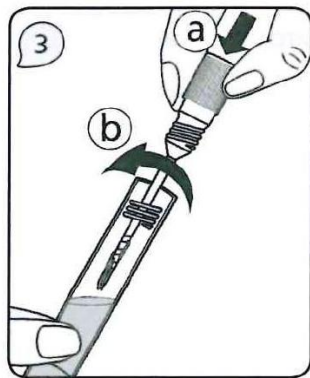
Ab dem 06.08.2018 werden wir den Nachweis von Hämoglobin im Stuhl mit dem quantitativen immunologischen Stuhltest iFOBT - QuikReadgo® durchführen. Das heißt sowohl der guajakbasierte Stuhltest auf okkultes Blut (gFOBT) als auch der immunologische Hb-Stuhltest (ELISA) werden ersetzt. Diese Maßnahme wurde erforderlich, da der bisherige POCT Guajak-Test (gFOBT) ab dem 01.10.2017 aus dem EBM Katalog gestrichen wurde. Mit dem neuen quantitativen immunologischen iFOBT erfüllen wir einerseits die Richtlinie zur Darmkrebsfrüherkennung und andererseits können wir die Ergebnisse tagesgleich zurückführen, was mit dem ELISA-Test nicht möglich war.

Eigenschaften des neuen iFOBT Testes:

- quantitative Bestimmung von Blut im Stuhl (Messbereich: 10 - 200 µg/g)
- Nachweisgrenze 10 µg/g Stuhl ([nice.org.uk/guidance/dg30](http://nice.org.uk/guidance/dg30))
- erhöhte Sensitivität im Vergleich zum gFOBT
- tagesgleiche Rückführzeiten der Testergebnisse

Der Test ist anforderbar über Lauris bzw. Anforderungsschein unter dem Kürzel Hb im Stuhl (iFOBT). Zu beachten ist das neue Stuhlentnahmeset mit entsprechender Anleitung, das über SAP bestellt werden muss: QuikRead go iFOBT Probenentnahmeset (Material 13000007833)

Anleitung zur Stuhlprobengewinnung:

<p><b>1. Dosierstab herausziehen</b></p>  <p>Die blaue Verschlusskappe aufdrehen und den daran befindlichen Dosierstab herausziehen.</p>	<p><b>2. Stuhlprobe aufnehmen</b></p>  <p>Dosierstab 3-mal an verschiedenen Stellen einer Stuhlprobe einstechen. Die Rillen der Dosierspritze müssen sich dabei mit Stuhlprobe füllen.</p>	<p><b>3. Dosierstab zurückführen</b></p>  <p>Den Dosierstab mit der daran anhaftenden Stuhlprobe <b>einmal</b> in das Stuhlprobenröhrchen stecken <b>nicht wieder herausziehen (nur so ist die für den Test definierte Stuhlmenge gewährleistet)</b> und dann durch Drehen verschließen.</p>
<p><b>4. Rückgabe der Stuhlprobe</b></p> <p>Das mit Ihrem Namen etikettierte Röhrchen bringen Sie bitte am gleichen Tag, spätestens aber am Folgetag in Ihre Arztpraxis zurück.</p>		